

Herodent®

Typ 3 Zahnstein für Antagonisten und Modelle
Type 3 dental stone for antagonists and models
Gesso Pedra Tipo 3 para antagonistas e modelos
Gelb/Yellow/Amarelo

Inhalt/Net Weight/Peso Liq/Peso Neto

1Kg

PROSTHETICS
COLTENE

Composição: α-Sulfato de Cálcio, Quartzo, Aditivos.
Colocar a quantidade indicada de água em uma cuba,
acrescentando lentamente o pó.
Espátular vigorosamente 1 min (movimentos circulares).
Tempo de remoção 45 min.
PARA USO PROFISSIONAL - Exclusivo para Laboratório
Odontológico - Não usar em Pacientes.
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Composición: α-Sulfato de Cálcio, Quartzo, Aditivos.
Colocar la cantidad indicada de agua en un bol, añadiendo
lentamente el polvo.
Espátular vigorosamente 1 min (movimentos circulares).
Tiempo de remoción 45 min.
PARA USO PROFESIONA - Exclusivo para Laboratório Odontológico
- No usar en pacientes.
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Composition: α-Calcium Sulphate, Quartz, Additives
Place the indicated amount of water in a bowl, slowly adding the
correct powder amount.
Mix vigorously for 1 min.
Removal time 45 min.
FOR PROFESSIONAL USE

Zusammensetzung: α-Calciumsulfat, Quarz, Zusatzstoffe.
Legen Sie die Wassermenge in einem Bogen, dann die angegebene
Menge an Pulver.
Mischen kräftig für 1 min.
Entformungszeit 45 min.
FÜR PROFESSIONELLEN EINSATZ

Coltene Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20 – 9450 Altstätten/Switzerland

Coltene Whaledent GmbH+Co.KG

Raiffeisenstraße 30 – 89129 Langenau / Germany

Coltene Whaledent Inc

235 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA

Vigodent S.A Indústria e Comércio

Made in Brazil – NCPJ 33.425.331/0001-22

Ind. Bras

Rua Pesqueira 26, 21041-150, Bonsucesso, Rio de Janeiro (RJ)

✉ sac@coltene.com.br – sac 0800 0247422

Resp. Tec.: Cátia Mara da Eira,

CRQ-RJ 03212642 – 3ª Região

030957

